

Potilastapaus: Syöpäpotilas, jolla turvotusta jaloissa

Potilas: Potilas on noin 70-vuotias nainen, joka vielä mukana työelämässä. Työ on pääsääntöisesti istumatyötä. Asiakkaalta on leikattu peräsuolisyöpä n. vuosi aiemmin, mutta se on nyt hallinnassa. Leikkauksen jälkeen jalkoihin on alkanut kertyä turvotusta nesteenpoistolääkkeestä huolimatta. Asiakas itse kokee turvotuksen hyvin raskaana ja se häiritsee hänen päivittäistä oloaan.

Menetelmät: Hoito aloitettu kaulalta suulakkeella 50, 50 mmHg:n paineilla. Tämän jälkeen hoidettu hartiat suulakkeella 60, 120 mmHg:n paineilla. Seuraavaksi siirrytty vatsan alueelle ja hoidettu pallean seutu ja nivuset suulakkeella 80, paineet 125 mmHg. Vaihdettu suulakkeeseen 50 ja hoidettu avanteen ympäristä. Jatkettu jalkoihin suulakkeella 80, 125 mmHg:n paineet, ylhäältä alas ja paluu liu'uttamalla alhaalta ylös nivusiin. Tämä tehty selinmakuulla. Sitten asiakas on kääntynyt päinmakuulle ja tehty selkä ja jalat suulakkeella 80, 125 mmHg:n paineet. Päinmakuulla hoidettu myös jalkapohjat suulakkeella 80, paineet 240 mmHg.

Tulokset: Hoidot tapahtuvat kerran viikossa samaa kaavaa noudattaen. Pari kertaa on ollut useamman viikon tauko ja asiakkaan jalat ovat päässeet taas pahaan kuntoon. Tämän asiakkaan kohdalla kerran viikossa tapahtuva LymphaTouch-hoito pitää jalat paremmassa kunnossa ja näin toimintakuntoisempana.