

Potilastapaus: Vatsan alueen paineen ja turvotuksen tunne

Potilas n. 35 v. nainen, toimistotyössä, ei harrasta liikuntaa

Alkustatus: alavatsassa 3,5 kk vanha poikittainen leikkausarpi n. 20 cm; vatsan alueella paineen ja turvotuksen tunnetta, ei kipua, toiveena saada LymphaTouch-hoidolla oloa kevenemään

Hoitokerrat 4 kpl: tehty 2 kertaa viikossa.

Kerta 1: kesto 30 min, avattu LymphaTouchilla soliskuoppien, kainaloiden ja ylävatsan tiehyet, hoidettu aluksi manuaalisella lymfalla vatsan aluetta, lopuksi kevyesti 15 min LymphaTouchilla, paine 40, pulssi 2.5, suulake 50. Ei huomattavaa muutosta asiakkaan tilassa.

Kerta 2: kesto 30 min, kuten edellä, mutta paine 50. Paineen tunne hiukan vähentynyt.

Kerta 3: kesto 30 min, kuten edellä. Turvotus vähentynyt.

Kerta 4: kesto 30 min. Hoidettu kuten edellä, lisäksi myös haavan ympäritys.

Loppustatus: Turvotus lieventynyt. Asiakkaan mielestä paine ja turvotus vähentyneet selvästi, hoitoa ei toistaiseksi jatketa.